

lh02

Návod k použití




Děkujeme Vám, že jste se rozhodli využívat naše produkty. Věříme, že budete naprosto spokojeni se spolehlivostí a funkcí, kterou všechny naše řady lehátek nabízejí. Pečlivě si přečtěte instrukce v tomto manuálu a manuál uchovejte pro možné další použití.

lh02

Důležité

- chybná instalace, nevhodné používání lehátka může způsobit zranění
- pravidelně (1xdenně, při přenášení po každém přenášení) kontrolujte všechny šrouby a spoje
- nikdy nepoužívejte lehátko, které není správně složeno, nebo jeho části jsou chybějící, poničené či chybně nainstalované
- chraňte lehátko před zvýšenou vlhkostí
- nevystavujte lehátko extrémním teplotám
- při nastavování jednotlivých sekcí a výšky lehátka dbejte, aby v prostoru pod lehátkem nebyla žádná osoba nebo předměty
- lehátko je určeno pouze k účelům masérským
- pravidelně (min 1xtýdně) kontrolujte stav celého stolu. V případě poškození nebo podezření na poškození, kontaktujte prodejce.
- ostrými předměty můžete lehátko poškodit
- nepřetěžujte lehátko nad uvedené nosnosti
- nenechávejte děti skládat nebo rozkládat lehátko
- nevyvíjejte tlak na stůl pouze v jednotlivých bodech (lokty, kolena, apod.)
- nepoužívejte poškozený stůl
- nepoužívejte alkoholové prostředky na lehátko
- lehátko vždy chraňte před přímým kontaktem s pokožkou. Používejte např. froté návleky, flanelové návleky a na tyto návleky role papíru nebo netkané textilie. Chraňte molitanový podhlavník, područky a opěru na ruce stejným způsobem jako lehátko.

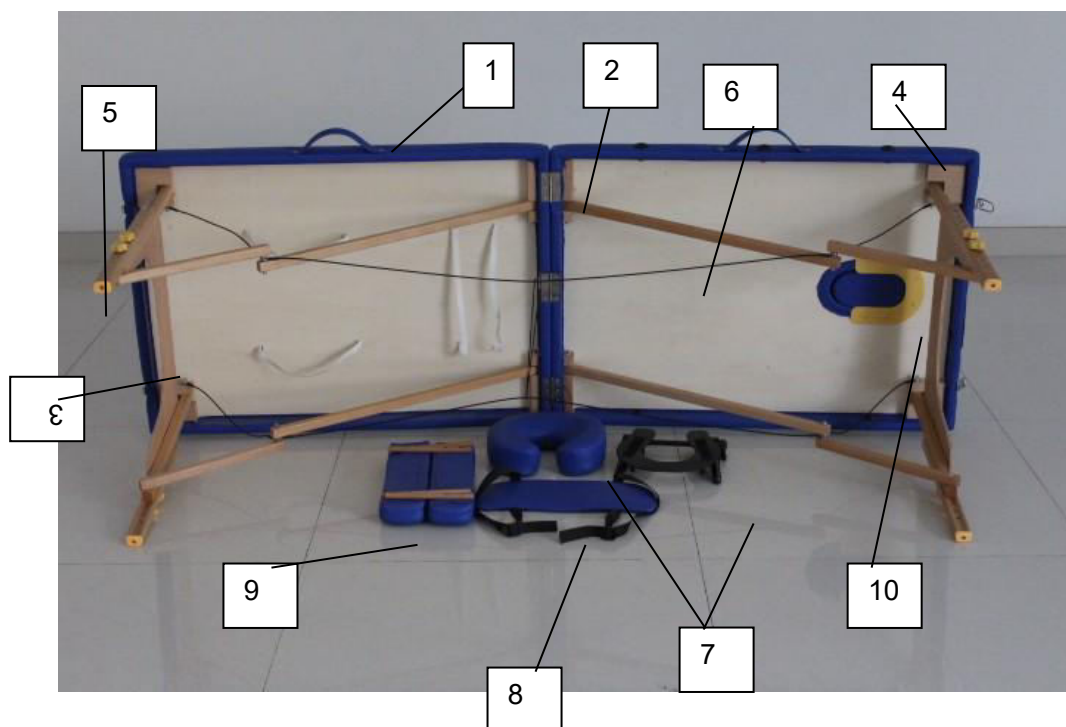

1. Madlo 2. Panty 3. Zpevňující deska 4. Otvor na područky
5. Pogumovaná koncovka 6. Lanko 7. Molitanový podhlavník s konstrukcí
8. Opěra na ruce pod hlavovým dílcem
9. Područky 10. Otvor na obličej se zátkou

Sestavení lehátka

Postupujte podle následujících obrázků.



1. Otevřete zámky umístěné na kratší straně lehátka
2. Položte lehátko na čistou, rovnou a vodorovnou plochu tak, aby madlo směřovalo směrem nahoru. Rozevřete lehátko.
3. Vyjměte příslušenství.
4. Lehátko postavte na nohy (ve dvou osobách, každá drží lehátko na jedné z kratších stran)
5. Připojte příslušenství k lehátku. Područky a opěrka na ruce – foto 5. Opěrku na ruce pod hlavovým dílcem instalujte tak, že ji dle typu lehátka zavěsíte za tyčky konstrukce hlavového dílce. Příslušenství se liší dle typu lehátka. Na příslušenství nikdy nesedějte nebo na něj nevyvíjejte nadměrný tlak.
6. Hlavový dílec s povolenou pákou vložte do otvorů na kratší straně lehátka a následně páku zaaretujte. Konstrukci hlavového dílu je nutno zasunout co nejvíce.
7. Stůl je připravený k použití.

Pouze pro lehátka s nastavitelnou sekcí – otevřete zámky na straně nastavitelné sekce. Nastavitelnou část napoložte do požadované pozice zvednutím konce (u strany u zámků) této části. Do vodorovné pozice vraťte tak, že nastavitelnou sekci napoložujete do maximální pozice (největší úhel k lehátku ve vodorovné pozici) a lehce vrátíte zpět. Nikdy nevracejte nastavitelnou sekci silou zpět. Nikdy nesedějte na nastavitelnou sekci, pokud není ve vodorovné poloze. Maximální zátěž nastavitelné sekce je 40kg.

Nastavení výšky lehátka – položte lehátko na bok. Odmontujte pojistné matice a nohu nastavte do vybrané možné pozice. Matice dotáhněte. Postup opakujte u každé nohy. Důležité! Nastavte do stejné výšky všechny nohy. Nikdy nepoužívejte lehátko s různě nastavenou výškou jednotlivých noh. Pravidelně kontrolujte, zdali jsou matice dostatečně dotáhnuté.

Složení lehátka

1. Položte lehátko na bok tak, aby madlo směřovalo směrem nahoru.
2. Uložte příslušenství dovnitř lehátka.
3. Sklopte nohy směrem do lehátka pomocí tlaku na kratší podpěrnou část nohy.
4. Složte lehátka a zámky uzavřete. V případě, že lehátko nejde lehce uzavřít, zkontrolujte, zda-li nevadí jednotlivá příslušenství.
5. Vložte do přepravního obalu a zipem uzavřete obal.



Údržba lehátka a péče o koženku

- nevystavujte lehátko extrémním teplotám
- nevystavujte lehátko přímým slunečním paprskům
- chraňte lehátko před nárazy o ostré hrany
- chraňte lehátko za pomoci froté návleků, prostěradel
- produkty s vysokým obsahem alkoholu mohou koženku poničit
- znečištění všech částí lehátek můžete pomocí saponátových prostředků, např. Corona, Universal apod. za použití houby nebo hadříku. K čištění nikdy nepoužívejte organických rozpouštědel (-benzol, trichlorethylen, aceton a pod.).
- dezinfekci částí docílíte dezinfekčním přípravkem, např. Mikasept Sprej, apod.

Technické parametry:

Šířka 70-80cm (bez područek) dle typu lehátka

Délka složeného lehátka dle typu 92- 98cm dle typu lehátka

Nosnost lehátka 200kg

Nosnost hlavového dílce ve tvaru „U“ 18kg

Upozornění: Nepoužívejte poškozené lehátko. Můžete způsobit zranění, eventuálně škody sobě nebo zákazníkům.

V případě jakýchkoliv dotazů či reklamace nás kontaktujte.

Prodávající: MedHelp, s.r.o., Kozinova 789, 290 01 Poděbrady, ČR

Tel.: +420 325 610 462

E-mail: obchod@medhelp-shop.cz

CZ www.medhelp-shop.cz

SK www.medhelp-shop.sk