

CS

POZORNĚ PŘEČÍST PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM VÝROBKU**Návod a Upozornění pro použití.**

Tento dokument je **nezbytnou příručkou** pro správné a bezpečné použití výrobků **Medicineball, Therapy ball a Twin Roll**, protože obsahuje **veškeré informace**, nezbytné pro **celkové uspokojení** uživatele a **bezpečné použití** výrobku po celou dobu životnosti výrobku a/nebo jeho částí.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ – OMEZENÍ A ZÁKAZY 

1. Tento výrobek byl navržen a realizován pro použití v rozličných oblastech, jako je například sport, fitness, gymnastika nebo zdravotnictví a školství oddělení. Výrobek nesmí být používán k jiným účelům, než jsou ty, které doporučuje firma **Ledragomma**.
2. **Nejedná se o hračku.**
3. **Nepoužívat výrobek pro cviky s činkami nebo jakýmkoli jiným typem závaží.**

OBSAH BALENÍ

4. Balení obsahuje jeden výrobek.

NAFUKOVÁNÍ / VYFUKOVÁNÍ

5. Pro nafukování/vyfukování výrobku je nutné používat zaoblenou nástavce, kterými jsou vybaveny mnohé ruční pumpičky (např. Hand Pump 19 cm -140 CC nebo 32 cm.- 300 CC). Nenařukat ústy.

ZPŮSOB A POSTUP PŘI PRVNÍM POUŽITÍ

6. Při prvním použití postupovat podle následujících pokynů:
 - 6.1) Výrobek je vybaven vnitřním ventilkem, přizpůsobeným pro nafukování/vyfukování.
 - 6.2) Před zasunutím do ventilkem navlhčit špičku ruční pumpičky a pomalu a s přestávkami výrobek nafouknout.
 - 6.3) Nikdy nepřekračovat maximální povolený průměr uvedený přímo na výrobku a/nebo na obalu:
 - Medicineball kg. 0,5 Ø cm.14
 - Medicineball kg. 1 Ø cm.20
 - Medicineball kg. 2, 3, 5 Ø cm.33
 - Therapy ball Ø cm.12
 - Twin Roll Ø cm. 7

POKyny A UPOZORNĚNÍ PRO NÁSLEDUJÍCÍ NAFUKOVÁNÍ 

7. Při následujících nafukováních nikdy nesmí být překročen maximální povolený průměr.

OPATŘENÍ NEZBYTNÁ PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM 

8. Před každým použitím je nutné zkontrolovat povrch výrobku. V případě řezů, prasklin, odřenin či jakéhokoli jiného poškození povrchu nesmí být výrobek použit pro podporu těla. V těchto případech je ohrožena bezpečnost výrobku, protože může dojít k nečekanému prasknutí a pádu osoby, která je o výrobek opřena.
9. Před každým použitím výrobku je nutné očistit povrch vodou a jemným mýdlem. Odolnější skvrny mohou být očištěny naředěným lihem.

10. TEPLOTNÍ MEZE 

Pozor: výrobek musí být udržován v prostředí s pokojovou teplotou (přibližně 18 - 20° C). V případě zvláště nepříznivých teplot je třeba před nafukováním vyčkat, než výrobek dosáhne pokojové teploty.

DOPORUČENÝ POVRCH 

11. Výrobek musí být používán na měkkém povrchu. Nikdy nepoužívat v blízkosti ostrých či řezavých předmětů nebo v blízkosti tepelných zdrojů; nepoužívaný výrobek nikdy neudržovat v místech vystavených přímému slunečnímu záření.

UPOZORNĚNÍ PRO OPRAVY 

12. V případě zjištění děr či prasklin se nepokoušejte o jejich opravu, protože neoborná oprava může ohrozit celistvost výrobku a způsobit vážné nebezpečí pro bezpečnost a zdraví uživatele.

SLEDOVATELNOST

13. Na výrobku naleznete kód složený z 6 čísel, který označuje měsíc a rok výroby zboží. Tento kód prosím uvádějte v případě reklamace, protože je nutný pro určení data a výrobní šarže použitých materiálů.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

14. Ledragomma S.r.l. odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob či zvířat nebo za škody na majetku či na životním prostředí, způsobené použitím výrobku v rozporu s pokyny pro použití a údržbu obsaženými v tomto návodu k použití a dodávaným spolu s výrobkem.

POZNÁMKY

15. Barevné provedení se může lišit.

5r2

Výrobce:



Ledragomma Srl - Zona Industriale - Via G.De Simon - 33010 Osoppo (Ud) – Italy
Tel.+39 0432/986049 – Fax +39 0432/986255 - info@ledragomma.com - info@ledragommapec.com - www.tonkey.it
